



ResMed

Tirer le meilleur
parti de votre
traitement par
PPC



Confort, entretien et télésuivi.



Sommaire

1. Le plus dur devrait être derrière vous	5
2. Suivi de l'évolution de votre traitement par PPC	7
3. Comment rendre votre traitement plus agréable ?	10
3.1 Si l'équipement est trop bruyant	11
3.2 Si le masque de PPC est inconfortable sur votre visage	12
3.3 Si le circuit ne cesse de se détacher pendant votre sommeil	13
3.4 Si vous avez un rhume ou si le traitement vous congestionne le nez	13
4. Entretien de votre équipement de PPC	15
4.1 Comment nettoyer votre masque ?	17
4.2 Comment nettoyer votre harnais ?	18
4.3 Comment nettoyer votre circuit ?	18
4.4 Comment nettoyer votre humidificateur ?	19
4.5 Quand votre équipement doit-il être remplacé ?	20
5. Autres questions fréquemment posées sur le traitement par PPC	22
6. Des patients traités par PPC témoignent	25
Conclusion	29



Le plus dur devrait être derrière vous


Pour de nombreuses personnes souffrant d'apnée du sommeil, la partie la plus difficile du traitement a lieu au cours des premiers jours et semaines, qui peuvent être délicats¹. S'habituer au port d'un masque de PPC pendant la nuit et à la sensation d'air sous pression n'est pas forcément aisé.

Ce mode d'emploi est destiné à ceux qui ont su composer en toute sécurité avec ces problèmes temporaires et qui parviennent à suivre leur traitement, du moins la plupart du temps. Si tel est votre cas, la bonne nouvelle est que le plus dur devrait être derrière vous. Vous devriez également vous sentir plus dynamique pendant la journée et vous sentir mieux dans votre peau et plus vivant grâce au fait que vos voies aériennes ne sont plus bloquées sans cesse pendant la nuit.

Néanmoins, peut-être n'êtes-vous que partiellement satisfait(e) des résultats, ou peut-être n'avez-vous pas du tout remarqué de différence. Cela peut arriver. Si vous envisagez d'arrêter votre traitement, contactez votre médecin ou votre prestataire de santé à domicile (PSAD), vous pourrez discuter de votre situation ensemble.

Généralement, un simple ajustement de votre traitement peut faire la différence. Découvrez avec nous comment le traitement du Syndrome d'Apnées Obstrucives du Sommeil (SAOS) par Pression Positive Continue (PPC) peut être plus agréable et connaître davantage de chances de réussite.

Commençons par une question simple : comment allez-vous ?

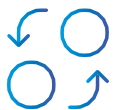

Le saviez-vous ?

Un simple ajustement de votre traitement peut faire la différence.



Le saviez-vous ?

Les données que vous recevez sur l'application myAir™ sont également disponibles sur le logiciel de votre médecin et votre prestataire de santé à domicile, qui peuvent suivre votre traitement à distance et intervenir si besoin.

Suivi de l'évolution de votre traitement par PPC

Vous sentez-vous mieux au réveil ou moins fatigué(e) pendant la journée depuis que vous avez commencé votre traitement contre le SAOS ?

C'est peut-être l'avantage le plus évident d'un traitement par PPC efficace². Vous pouvez en ressentir les bénéfices dans votre vie quotidienne. Si c'est le cas, continuez ! Pour rappel, il n'existe aucun remède curatif contre le SAOS, seulement des solutions qui traitent vos symptômes. Si vous arrêtez d'utiliser votre appareil de PPC, vos problèmes de santé et la fatigue reviendront.

Auparavant, la seule façon de savoir si le traitement par PPC fonctionnait était de juger selon votre ressenti, votre humeur et votre niveau de fatigue. Depuis peu, la technologie est en mesure d'analyser vos résultats et de transmettre des informations sur votre sommeil. Désormais, les outils numériques et la connectivité vous permettent de suivre vos progrès quotidiennement et sur le long terme.

Les derniers appareils de PPC peuvent analyser vos données pendant que vous dormez. Par exemple, ils peuvent compter le nombre d'apnées que vous faites, l'étanchéité de votre masque et la durée pendant laquelle vous avez utilisé votre appareil pendant la nuit. Ils peuvent vous donner un score journalier (ou plutôt nocturne).



Qu'est-ce l'application d'accompagnement myAir ?



Le traitement en bref

Chaque matin, sur votre tableau de bord myAir vous pouvez recevoir des statistiques simples qui vous indiquent comment s'est déroulée votre nuit avec votre traitement de l'apnée du sommeil. Vous pouvez observer l'évolution au cours des deux semaines précédentes et même télécharger votre rapport de traitement.



Accompagnement et renforcement

Vous recevrez des e-mails d'accompagnement personnalisés pour vous aider à rendre le traitement plus agréable, des messages de félicitations lorsque vous franchissez des étapes importantes et des encouragements réguliers pour vous motiver à poursuivre votre traitement !



Outils pédagogiques

La bibliothèque myAir contient des instructions pratiques, des vidéos et d'autres supports pour vous aider dans votre traitement. Elle offre des informations personnalisées en fonction de votre appareil d'apnée du sommeil et du type de masque.



Comment rendre votre traitement plus agréable ?


Si vous envisagez d'arrêter le traitement parce que vous le trouvez gênant, il existe de nombreuses façons de le rendre plus agréable et plus facile à adopter.

Vous devez toujours consulter votre médecin ou votre prestataire de service si vous souhaitez changer votre appareil, les paramètres de pression d'air, votre masque ou tout autre composant de votre équipement de PPC. **Les points suivants couvrent certains des problèmes les plus courants rencontrés par les patients souffrant d'apnée du sommeil, ainsi que d'éventuelles solutions dont vous pouvez discuter avec votre médecin ou votre prestataire de santé à domicile.**

Si l'équipement est trop bruyant...

Parfois, le traitement par PPC peut générer un peu de bruit, qui est dû soit à l'appareil lui-même, soit à la fuite intentionnelle du masque, orifice qui permet d'expulser l'air que vous expirez. Encore une fois, comme la technologie disponible est de plus en plus avancée, ce problème peut être résolu plus facilement.

Pour la fuite intentionnelle, il existe des solutions récemment développées, notamment des modèles de masque qui maintiennent le son de l'air expiré à 21 décibels. Aussi silencieux qu'un murmure, littéralement !

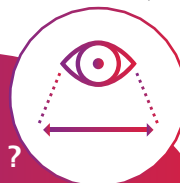

Le saviez-vous ?

Les masques minimalistes vous offrent un large champ de vision et constituent une bonne alternative si vous êtes gêné(e) par votre masque ou si vous vous sentez claustrophobe.

Si le masque est inconfortable sur votre visage...

Les bulles de nombreux masques étant en silicone, si vous avez la peau sensible, **vous pourriez, au réveil, constater des marques rouges sur l'arête de votre nez**. Les appuis frontaux peuvent également laisser des marques similaires sur le front. Ces marques ne sont que temporaires, mais elles peuvent néanmoins représenter un inconvénient. Si cela se produit, des solutions existent.

Vous pouvez remplacer les bulles en silicone par des modèles plus doux en mousse à mémoire de forme, un matériau respirant qui est non seulement plus léger, mais aussi moins susceptible de provoquer des marques rouges sur la peau.

Vous pouvez également vous renseigner sur les différents types de masques proposés. **Certains ne couvrent pas du tout le front ou l'arête du nez**, car ils reposent sous le nez ou s'appuient sur vos narines. Ces masques minimalistes réduisent la zone de contact entre le visage et le masque, évitant ainsi toute irritation sur le front ou l'arête du nez et prévenant les marques rouges au niveau de ces zones.

Si votre masque est gênant pour la personne qui partage vos nuits

Dans certaines situations, l'air expiré peut être évacué vers le visage de votre partenaire ou faire du bruit. Pour y remédier, **il existe des fuites intentionnelles** qui diffusent le flux d'air et d'autres qui intègrent une maille tissée réduisant le niveau sonore à celui d'un murmure.

Si le circuit ne cesse de se détacher pendant votre sommeil...

Il peut arriver, surtout si vous êtes un dormeur actif qui se retourne, que le circuit transportant l'air de votre PPC vers votre masque se déplace pendant la nuit. Peut-être qu'une main, un bras ou un oreiller l'a détaché. Encore une fois, vous pouvez trouver de l'aide à ce sujet parmi les nombreux masques qui existent. Sur certains modèles, le raccord du circuit se trouve sur la partie supérieure de la tête, tandis que sur d'autres, il se trouve à l'avant du masque. **Les modèles « avec connexion haute »** permettent une plus grande liberté de mouvement pendant votre sommeil et le circuit est moins susceptible de se détacher. Selon que vous dormiez sur le ventre, sur le dos ou sur le côté, vous devriez trouver un masque qui permet au circuit de rester fixé toute la nuit.

Si vous avez un rhume ou si le traitement vous congestionne le nez

De temps en temps, vous pourriez constater que vous avez le nez ou les sinus bouchés pendant votre traitement. **Une solution simple possible consiste à utiliser un humidificateur**. Un appareil de PPC envoie de l'air froid dans le nez ou la bouche (ou les deux) lorsqu'il est allumé. Un humidificateur transforme cet air froid en air chaud et humide, ce qui peut réduire les risques d'avoir le nez congestionné et procurer une sensation plus agréable. Un humidificateur est également utile si vous avez un rhume ou le nez congestionné³.



Entretien de votre équipement de PPC

Votre équipement de PPC est plus susceptible d'être efficace s'il est maintenu en bon état. Ce n'est pas un équipement qui nécessite beaucoup d'entretien, seulement un petit effort régulier pour maintenir ses performances. Veuillez vous reporter au mode d'emploi pour des conseils spécifiques sur l'entretien de votre équipement.

En général, nous recommandons la routine de nettoyage suivante :



**Tous les jours :
masque et cuve de
l'humidificateur**



**Toutes les semaines :
harnais, circuit et
surfaces extérieures
de l'humidificateur**

Un équipement non nettoyé peut compromettre les résultats de votre traitement par PPC et pose un problème d'hygiène. Le sébum produit par la peau peut provoquer une accumulation de résidus, ce qui peut affecter l'ajustement de votre masque ou provoquer une fuite, lorsque l'air sous pression s'échappe du masque. Par conséquent, la pression d'air risque de ne pas être à un niveau efficace. Dans ce cas, vous ne ressentirez pas les bienfaits du traitement par PPC et les symptômes, comme la somnolence diurne, les ronflements ou les maux de tête, peuvent réapparaître. Vous n'avez besoin d'aucun produit spécifique pour maintenir votre équipement en bon état **(de l'eau et du savon liquide non parfumé suffisent)**. De plus, **les lingettes nettoyantes pour masque peuvent être utiles** en vacances ou simplement pour gagner du temps.

Le saviez-vous ?

Un équipement non nettoyé peut compromettre les résultats de votre traitement par PPC.



Nous vous décrivons ici les instructions de nettoyage étape par étape pour vous aider à obtenir une expérience de traitement plus agréable.

Vérification des filtres

Il est important d'inspecter le filtre de votre appareil pour vérifier qu'il n'est ni obstrué ni percé. La fréquence de changement pourra varier selon le type de filtre utilisé et l'environnement : dans le cas de filtres hypoallergéniques ou d'environnement poussiéreux les filtres seront à changer plus fréquemment.

Comment nettoyer votre masque

- 1 Démontez le masque (voir le mode d'emploi pour obtenir de l'aide à ce sujet). Si un masque avec coussins nasaux est utilisé, retirez les coussins du cadre.
- 2 À l'exception des housses souples et du harnais, lavez toutes les parties de votre masque à l'eau tiède (30 °C) avec un savon doux. Il faut essayer de retirer le sébum de la bulle du masque, **à moins que vous ayez une bulle en mousse à mémoire de forme, qui ne doit jamais être complètement immergée dans l'eau, mais plutôt être nettoyée régulièrement avec un chiffon.**
- 3 Avec une brosse à poils souples, nettoyez délicatement la fuite intentionnelle du masque et toutes les pièces rotatives.
- 4 Inspectez soigneusement toutes les parties du masque. Si quelque chose ne semble pas propre ou si vous constatez encore une accumulation de sébum, lavez à nouveau en utilisant la méthode ci-dessus.
- 5 Enfin, bien rincer le tout à l'eau potable et laisser sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.



Comment nettoyer votre harnais

- ❶ Laver votre harnais à la main avec un savon liquide doux.
- ❷ Bien rincer, essorer l'excès d'eau et laisser sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.

Comment nettoyer le circuit

Nous vous recommandons de retirer le circuit tous les jours et de le suspendre dans un endroit propre et sec. **Éviter les endroits exposés à la lumière directe du soleil, car cela peut provoquer une fissure du circuit.** Vous devez nettoyer votre circuit une fois par semaine comme suit :

- ❶ Retirer le circuit de l'appareil de PPC.
- ❷ Le laver à l'eau tiède avec un savon liquide doux.
- ❸ Bien le rincer et le suspendre pour qu'il sèche dans un environnement propre, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Comment nettoyer votre humidificateur

- ❶ La cuve de l'humidificateur doit être lavée chaque jour à l'eau tiède et à l'aide d'un détergent doux. Ensuite, bien la rincer et la laisser sécher à l'air libre, en évitant la lumière directe du soleil.
- ❷ Une fois par semaine, vous devez :
 - essuyer l'extérieur de la cuve avec un chiffon humide et un détergent doux ;
 - sécher le tout en essuyant avec un chiffon sec.

Vous n'avez pas beaucoup de temps ? **Le couvercle de la cuve, la base et la plaque peuvent être nettoyés au lave-vaisselle** au programme délicat ou verres (à l'étage du dessus uniquement). Ces éléments ne doivent pas être lavés à des températures supérieures à 55 °C.

Si vous constatez des résidus blancs sur l'un des composants de l'appareil, ils peuvent être nettoyés à l'aide d'une solution de 1 volume de vinaigre ménager pour 10 volumes d'eau.

Quand votre équipement doit-il être remplacé ?

Chaque fois que vous nettoyez l'un des composants de votre équipement de traitement par PPC, il est recommandé de l'inspecter pour déceler toute trace d'usure.

La fréquence à laquelle les appareils, masques ou autres produits doivent être remplacés dépendra de la fréquence à laquelle vous les utilisez ou les nettoyez ainsi que du produit utilisé. Le mode d'emploi du produit vous fournira les informations dont vous avez besoin. Les masques sont conçus pour être utilisés toutes les nuits, mais, ils doivent être remplacés aux premiers signes d'usure.

Les avantages à bien entretenir votre équipement de traitement par PPC :



Une augmentation du temps passé à dormir⁴



Un sommeil de meilleure qualité et un regard sur la vie plus positif⁵



La possibilité de poursuivre aisément votre traitement⁴

Les signes courants qui indiquent qu'il est temps de remplacer votre masque sont les suivants :

- ✗ **Votre traitement ne semble pas être aussi efficace** qu'auparavant ; les symptômes du SAOS dont vous souffrez semblent réapparaître.
- ✗ **Vous vous retrouvez à devoir resserrer les sangles du harnais très fréquemment** ou à les serrer plus que vous ne le faisiez habituellement.
- ✗ **Votre masque est rigide, lâche ou s'ajuste moins bien à la forme de votre visage** par rapport à la première fois où vous l'avez utilisé.
- ✗ **La bulle du masque semble trouble**, n'est plus transparente ou est glissante, même après avoir été nettoyée et séchée. En outre, un masque sale finira par générer une odeur désagréable.
- ✗ **Vous remarquez des signes évidents d'usure** tels que des fissures.

La fréquence de remplacement des masques est propre à chaque patient et à chaque modèle, mais si vous avez constaté l'un des éléments ci-dessus, contactez votre prestataire de santé à domicile pour une solution adaptée.

Autres questions fréquemment posées sur le traitement par PPC

Si j'arrête d'utiliser mon appareil de PPC, mes symptômes réapparaîtront-ils ?

Il n'existe pas de remède curatif connu contre le SAOS, donc votre traitement par PPC traite les symptômes de votre apnée du sommeil, mais ne la guérit pas. Cela signifie que si vous arrêtez d'utiliser votre appareil de PPC pendant la nuit, vos voies aériennes risquent de s'obstruer et vos symptômes liés au SAOS, comme les maux de tête matinaux ou la somnolence diurne, de réapparaître très certainement.

Si j'ai un rhume, dois-je arrêter le traitement par PPC ?

Si vous arrêtez d'utiliser votre appareil de PPC la nuit, vos symptômes liés au SAOS sont susceptibles de réapparaître. Vous pourriez vous sentir épuisé(e) si vous avez un rhume et l'absence de traitement pourrait augmenter cette fatigue.

Si vous utilisez un masque nasal et que votre nez est congestionné, consultez votre médecin ou votre prestataire de santé à domicile qui pourront ajuster les paramètres de l'appareil. **Les humidificateurs chauffants peuvent également être utiles pour réduire la congestion³.**

Le nez congestionné ou sec peut également être causé par une fuite de masque due à un équipement mal ajusté. Vous devrez peut-être ajuster votre harnais, nettoyer votre équipement ou essayer un autre masque.

Je constate que je me sens ballonné après avoir utilisé mon appareil de PPC. Est-ce normal ?

Parfois, les patients traités par PPC peuvent ressentir de l'inconfort et des ballonnements qui peuvent être dus à l'aérophagie, la présence d'air dans le ventre (estomac). Si vous craignez d'en souffrir, vous devez consulter votre médecin au sujet des traitements possibles.

Puis-je emporter mon appareil de PPC en vacances ?

Oui ! Les appareils ResMed peuvent fonctionner sur diverses sources d'alimentation et peuvent donc être emportés à l'étranger. N'oubliez pas de prendre le bon adaptateur pour le pays dans lequel vous voyagez afin de pouvoir brancher l'appareil à une source d'alimentation. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le mode d'emploi de votre appareil et scannez le code QR ci-dessous.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez télécharger notre guide dédié au voyage avec votre traitement ici :





Des patients traités par PPC témoignent

Ces témoignages sont des comptes rendus authentiques et documentés de la réponse de l'individu au traitement.

Les problèmes et les résultats peuvent varier, et la réponse au traitement de ces personnes ne fournit aucune indication, assurance ou garantie que d'autres personnes auront la même expérience ou une expérience similaire. Parlez-en à votre médecin ou votre prestataire de santé à domicile pour obtenir de plus amples informations.

« L'hôpital a décidé de me prescrire le nouvel appareil de PPC, qui est connecté à myAir (l'application d'accompagnement connectée de ResMed) et cela a fait toute la différence. Il vous dira combien d'heures vous avez passé à dormir, combien de fois vous avez mis ou retiré le masque, combien d'apnées vous avez eues et à quel point l'étanchéité de votre masque est bonne. De plus, vous pouvez garder une trace de toutes ces données. C'est simple à mettre en place et le tour est joué ! Ce n'est pas si déroutant. »

« **Maintenant, j'ai un aperçu de ce qui m'arrive réellement pendant la nuit.** Je n'ai pas les mots pour dire à quel point c'est incroyable, c'est tellement génial. **Je sais désormais quoi faire. Je sais que la nuit dernière, l'étanchéité de mon masque n'était pas parfaite. J'ai remarqué que je n'avais pas très bien dormi, donc ce soir, je dois simplement l'ajuster. Si vous avez des problèmes, l'application donne des astuces.** »

Andy



« **J’ai souffert d’apnée du sommeil mixte sévère, un mélange d’apnée obstructive et d’apnée centrale.**

Le personnel médical pensait d’abord que c’était l’obstruction qui était le problème, alors on m’a donné un appareil de PPC et on m’a également parlé de (l’application myAir) que ResMed utilise. Elle a commencé à me montrer que mon état empirait avec le temps. »

« L’obstruction n’était pas tellement le problème. C’était plutôt l’apnée centrale. Le personnel médical a de nouveau affirmé qu’il **continuerait de me surveiller à distance tous les jours pendant trois mois.**

« Je suis passé de 80 apnées par heure à pratiquement aucune. Je peux maintenant me réveiller, **consulter cette l’application d’accompagnement connectée pour voir au quotidien, sur mon téléphone,** combien d’heures j’ai dormi et combien de fois en moyenne j’ai arrêté de respirer. Je ne remercierai jamais assez le personnel, c’est génial ! Je peux maintenant me lever à six heures du matin, partir toute la journée et être encore éveillé à onze heures du soir. Je n’ai jamais fait ça de toute ma vie ! »

Paul



« L’application d’accompagnement de ResMed, myAir, me donne quotidiennement les informations que je souhaite connaître, afin de pouvoir ajuster les paramètres en conséquence. Il suffit de se connecter et si quelque chose n’est pas clair, on peut aller regarder des vidéos, qui nous indiquent exactement quoi faire. Elles sont très claires et concises. Elles nous fournissent des informations précises, donc c’est facile, vraiment. **J’ai emporté mon appareil à l’étranger, et j’ai pu accéder à myAir et continuer à l’utiliser exactement comme je le fais à la maison.** Pouvoir avoir accès à l’application d’accompagnement myAir, qui indique mes apnées, l’étanchéité de mon masque... C’est génial, parce que je reste toujours en contact avec mon appareil. »

Rose



Conclusion

L'apnée du sommeil peut constituer un véritable obstacle entre vous et votre sommeil, vos objectifs et votre santé globale, mais, en utilisant régulièrement votre appareil de PPC, vous pouvez vivre mieux.⁶

Donnez-vous les meilleures chances de réaliser ce que vous souhaitez le plus dans la vie. Qu'il s'agisse d'une promotion au travail, d'un mode de vie plus sain ou de temps de qualité pour profiter des amis et de la famille, commencez simplement par une bonne nuit de sommeil.



Références

¹ Allen KY et al. The Clinician's Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care, 2009.

² Wimms, A.J., et al., Continuous positive airway pressure versus standard care for the treatment of people with mild obstructive sleep apnoea (MERGE): a multicentre, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med*, 2019.

³ Richards, G.N., et al., Mouth leak with nasal continuous positive airway pressure increases nasal airway resistance. *Am J Respir Crit Care Med*, 1996. 154(1): p. 182-6.

⁴ A.V., et al., Positive Airway Pressure Therapy Adherence with Mask Resupply: A Propensity-Matched Analysis. *J Clin Med*, 2021. 10(4).

⁵ ResMed external clinical study of 400 PAP patients, conducted between 16/10/2017 – 27/10/2017, 2017 data on file; ID C278965.

⁶ Sutherland, Kate, et al. 'From CPAP to Tailored Therapy for Obstructive Sleep Apnoea'. *Multidisciplinary Respiratory Medicine*, 2018. 44.

Mentions produits

Veillez vous référer au guide de l'utilisateur pour obtenir des informations pertinentes liées aux éventuels avertissements et précautions à prendre en compte avant et pendant l'utilisation du produit.

Distribué par : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex France. Siret 407 775 170 000 43 - RCS Lyon. Fabriqué par : ResMed. **myAir** est une plateforme logicielle d'engagement des patients destinée à être utilisée par les patients à qui un appareil ResMed compatible a été prescrit afin de suivre les données d'utilisation du traitement et de bénéficier d'un accompagnement (vidéos pédagogiques, conseils) dans un cadre personnel à domicile. La fonction Assistant personnel de traitement (PTA) myAir s'adresse aux patients qui se voient prescrire un appareil ResMed Air 11 compatible pour simuler à distance un traitement avant d'utiliser leur appareil aux paramètres prescrits. myAir est un accessoire logiciel en option qui permet aux patients de s'acclimater à leur appareil de traitement. - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. **L'appareil AirMini autopiloté** est indiqué pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez les patients pesant plus de 30 kg. Prévu pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. **Le masque nasal AirFit N20** est destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil à pression positive tel qu'un appareil de PPC ou à deux niveaux de pression. Prévu pour une utilisation par des patients pesant plus de 30 kg à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou pour un usage multiple par plusieurs patients en milieu médical. L'utilisation des masques avec des composants magnétiques est contre-indiquée chez les patients présentant les caractéristiques pré-existantes suivantes : • dispositif hémostatique métallique implanté dans le crâne suite à un anévrisme ; • éclats métalliques dans un oeil ou dans les deux yeux suite à un traumatisme oculaire pénétrant. - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. **Le masque AirFit F30i** est destiné aux patients de plus de 30 kg à qui un traitement par pression positive non invasif, comme un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression, a été prescrit. Le masque est prévu pour un usage multiple par un seul patient à domicile ou pour un usage multiple par plusieurs patients à l'hôpital ou en milieu médical. La bulle AirTouch N20 est conçue pour un usage multiple par un seul patient, au domicile et en milieu médical. Il est recommandé de remplacer la bulle chaque mois. L'utilisation de masques avec des composants magnétiques est contre-indiquée chez les patients présentant les pathologies ou états préexistants suivants : • dispositif hémostatique métallique implanté dans le crâne suite à un anévrisme, présence d'éclats métalliques dans un oeil ou les deux yeux. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. **Le masque ultra-compact nasal AirFit N30** est destiné aux patients de plus de 30 kg à qui un traitement par pression positive non invasif, comme un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression, a été prescrit. Le masque avec QuietAir est prévu pour une utilisation multiple par un seul patient à domicile ou en milieu médical. - Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Ce document (Page ou Vidéo) ne saurait remplacer un avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin. **Le(s) masque(s) narinaire(s) AirFit P10 (et AirFit P10 for Her)** est (sont) destiné(s) à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue tel qu'un appareil de PPC (Pression Positive Continue) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients (poids>30kg) à qui un traitement par pression positive a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu médical - Ce(s) dispositif médical (médicaux) est(sont) un(des) produit(s) de santé réglementé(s) qui porte(nt), au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les manuels utilisateur fournis avec les dispositifs. Ce document ne saurait remplacer un avis médical, Veuillez prendre contact avec votre médecin.



ResMed



Le saviez-vous ?

Vous pouvez télécharger
notre gamme complète
de guides pour patients
[ici](#)

ResMed.fr

Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

myAir est une marque de commerce de ResMed Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

© 2021 ResMed. 10112983/1 2023-01